



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

### **Materac rehabilitacyjny SIRONA**



**JANPOL**  
FABRYKA MATERACY

Fabryka Materacy JANPOL Sp.z o.o.  
43-180 Orzesze, ul. Cynkowa 2a



#### **1. Przewidziane zastosowanie**

Materac typu „SIRONA” zbudowany z 5 pianek o zróżnicowanych gęstościach, ułożonych w 12 poziomych i 5 pionowych stref twardości, charakteryzuje się idealnym dopasowaniem się do kształtów ciała, niezależnie od wagi użytkownika. Dzięki połączeniu wysokiej elastyczności punktowej górnych warstw i odpowiedniej stabilizacji rdzenia, materac nie tylko zapewnia idealne dopasowanie, ale też poprawia krążenie krwi, niweluje nadmierny ucisk, zapewniając pełną regenerację mięśni, niezakłócony sen i relaks.

Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych średnio twardych. Zalecany jest przy niektórych schorzeniach kręgosłupa (wg zaleceń lekarza).

Przewidziane zastosowanie: łagodzenie dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn.

Przeznaczenie podstawowe – sprzęt rehabilitacji leczniczej w użyciu domowym i szpitalnym.

Do rehabilitacji w użyciu domowym zalecane stosowanie pokrowca z podstawowej oferty handlowej.

Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub nakładki higienicznej z możliwością prania w temp.95st.C.

#### **2. Zalecenia użytkowe**

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac należy odpakować z folii celem przewietrzenia. Specyficzny zapach może utrzymywać się przez kilka dni, w tym czasie należy wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się materac.

Materac jest przeznaczony do leżenia i musi znajdować się na łóżku odpowiednio do niego dostosowanym. Długość i szerokość ramy łóżka muszą odpowiadać wymiarowi materaca. Niedopuszczalne jest ułożenie wyrobu bezpośrednio na podłodze czy powierzchni pozbawionej otworów ze względu na brak odpowiedniej wentylacji.

Materac powinien leżeć na odpowiednio dobranym drewnianym stelażu. Wymagane są stelaże sprężynujące, w których odległość pomiędzy listwami jest nie większa niż 4 cm.

Materac można stosować do stelaży z regulowanymi elementami.

Zaleca się okresowe odwracanie materaca (przód-tył oraz góra-dół) co powoduje przedłużenie żywotności.

Materac należy użytkować i przechowywać w suchym

pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wodą, należy go niezwłocznie wysuszyć. Natomiast po zmoczeniu innymi substancjami, pokrowiec prać i dezynfekować zgodnie z wszywką.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zaprzestać używania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

#### **3. Przeciwwskazania do stosowania**

Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

#### **4. Przechowywanie i konserwacja**

Materac należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem.

Wyrób należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i nadmiernego kurzu.

Procedurę prania pokrowca należy przeprowadzić zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce. Poniżej objaśnienia zastosowanych symboli:



prać w temp. do 30 st. C



zakaz wybielania



nie suszyć mechanicznie



czyścić w czterochloroetylenie lub w benzynie



zakaz prasowania

#### **5. Skład surowcowy**

Ze względu na możliwość nietypowych uczuleń podajemy skład surowcowy materaca:

- poliester, lyocell, elastan (skład tkaniny obiciowej)
- poliamid, pianka poliuretanowa (skład wkładu materaca).