



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Materac rehabilitacyjny FIDES



JANPOL
FABRYKA MATERACY

Fabryka Materacy JANPOL Sp.z o.o.
43-180 Orzesze, ul. Cynkowa 2a



1. Przewidziane zastosowanie

Materac typu „FIDES” charakteryzuje się wysoką sprężystością z jednoczesnym dopasowaniem się do kształtów ciała. W zależności od różnego obciążenia przez części ciała, w poszczególnych strefach materac posiada różną twardość. To rozwiązanie uzyskano dzięki zastosowaniu siedmiostrefowej twardości płyty lateksowej. Dodatkowo wysoka gęstość lateksu gwarantuje stabilne wsparcie ciała oraz większą trwałość materaca.

Materac ten zaliczany jest do materacy rehabilitacyjnych twardych, wysoko sprężystych. Zalecany jest przy niektórych schorzeniach kręgosłupa (wg zaleceń lekarza).

Przewidziane zastosowanie: łagodzenie dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn.

Przeznaczenie podstawowe – sprzęt rehabilitacji leczniczej w użyciu domowym i szpitalnym.

Do rehabilitacji w użyciu domowym zalecane stosowanie pokrowca z podstawowej oferty handlowej.

Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub nakładki higienicznej z możliwością prania w temp. 95st.C.

2. Zalecenia użytkowe

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac należy odpakować z folii celem przewietrzenia. Specyficzny zapach może utrzymywać się przez kilka dni, w tym czasie należy wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się materac.

Materac jest przeznaczony do leżenia i musi znajdować się na łóżku odpowiednio do niego dostosowanym. Długość i szerokość ramy łóżka muszą odpowiadać wymiarowi materaca. Niedopuszczalne jest ułożenie wyrobu bezpośrednio na podłodze czy powierzchni pozbawionej otworów ze względu na brak odpowiedniej wentylacji.

Materac powinien leżeć na odpowiednio dobranym drewnianym stelażu. Wymagane są stelaże sprężynujące, w których odległość pomiędzy listwami jest nie większa niż 4 cm.

Materac można stosować do stelaży z regulowanymi elementami.

Zaleca się okresowe odwracanie materaca (przód-tył oraz góra-dół) co powoduje przedłużenie żywotności.

Materac należy użytkować i przechowywać w suchym pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wodą, należy go niezwłocznie wysuszyć. Natomiast po zmoczeniu innymi substancjami, pokrowiec prać i dezynfekować zgodnie z wszywką.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zaprzestać używania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

3. Przeciwwskazania do stosowania

Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

4. Przechowywanie i konserwacja

Materac należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem.

Wyrób należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i nadmiernego kurzu. (wilgotność: 30-75%, temperatura: -25 - 70° C).

Procedurę prania pokrowca należy przeprowadzić zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce. Poniżej objaśnienia zastosowanych symboli:



prać w temp. do 40 st. C



zakaz wybielania



nie suszyć mechanicznie



czyścić
w czterochloroetylenie lub
w benzynie



zakaz prasowania

5. Skład surowcowy

Ze względu na możliwość nietypowych uczuleń podajemy skład surowcowy materaca:

- poliester (skład tkaniny obciowej)
- poliamid, lateks syntetyczny i naturalny (skład wkładu materaca).